

# ホース洗浄・消毒の説明



## 機器に電源を入れる



本体裏面の電源スイッチを図のようにつけると機器が作動する



本体の液晶画面に“作動モードを選択してください”が表示される

## ホース洗浄



- 汚物タンクを空にし、水を入れる
- ① スタンドにレシーバーをかける
  - ② 自動洗浄用カバーを装着する



- ① “→” ボタンを約5秒ほど長押しし、“1-037 ホース洗浄” 画面を確認する
- ② “←” ボタンを押し、“1.ホース洗浄” を選択する
- ③ “確認” ボタンを押すと作動する


約30分後



ホース洗浄が完了すると画面に“ホース洗浄完了”メッセージが表示される

## ホース消毒

※ ホース消毒はホース洗浄後にしてください。

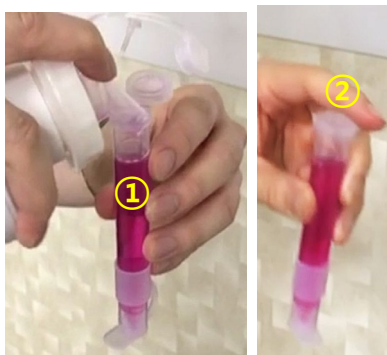

- 汚物タンクを空にし、水を入れる
- ① 消毒液チューブキットに消毒液(メーカー推奨)10mlを入れ、
  - ② 本体ふたを閉める



- ① “→” ボタンを押し、“2.ホース消毒” を選択する
- ② “確認” ボタンを押すと作動する



自動洗浄用カバーに消毒液チューブキットを図のように差し込んだ後、ふたを開ける

約20分後



ホース消毒が完了すると画面に“消毒完了”メッセージが表示される