

작동 방법



본체 뒷면의 전원을 켭니다.



"자동" 버튼을 누르세요.

거치대 보관 방법



거치대는 본체 내부에 보관하세요.

세척 방법



- 오물통 비움, 세정수통 채움
- ① 거치대에 기저귀컵 고정
- ② 세척용 플라스틱 커버 장착



- ① "→" 버튼을 5초간 꾹 눌러 화면에 "1-037 호스세척" 표시 확인
- ② "←" 버튼을 한번 눌러 "1.호스세척" 선택 후, ③ "확인" 버튼을 눌러 실행

약 30분 후



세척 완료 시, 화면에 "세척완료" 메시지 알림

소독 방법

※ 세척을 마친 후, 소독을 진행하시기 바랍니다.



- 오물통 비움, 세정수통 채움
- ① 소독용 튜브키트에 소독액(세니자임) 10ml 주입 후, ② 뚜껑 닫음



- ① "→" 를 눌러 화면에서 "2.호스소독" 선택 후, ② "확인" 을 눌러 실행



세척용 플라스틱 커버에 소독용 튜브키트를 장착 후, 뚜껑 열기

약 20분 후



소독 완료 시, 화면에 "소독완료" 메시지 알림